

Mascarilla quirúrgica (BFE  $\geq$  98%)  
Tipo IIR



## Mascarilla quirúrgica (BFE $\geq$ 98%) Tipo IIR



### Información técnica

Tipología: Mascarilla quirúrgica desechable

Tamaño: 17,5 x 9,4 cm

Modelo: BHKZ-001

Estándar: CE: EN 14683-2019 + AC:2019

Eficacia de filtración bacteriana:  $\geq$  98%

Prestaciones:


Tipo IIR: calidad máxima para quirúrgicas

Resistente a salpicaduras

Estructura: cuerpo de la máscara, pinza nasal  
y agarre de la máscara

Caducidad: 24 meses

Aviso de alergia: Textil no tejido

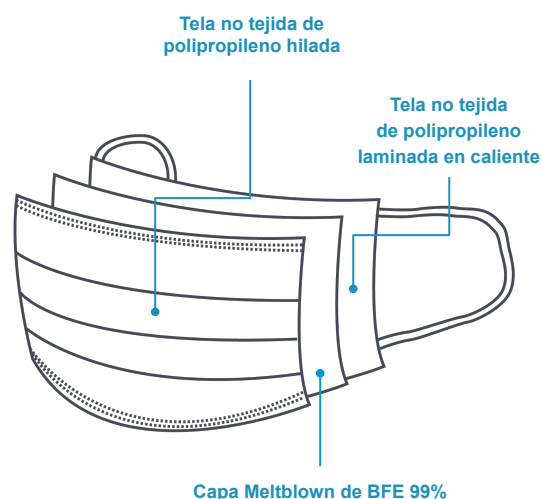

### Instrucciones para ponerse la mascarilla

1. Con el lado azul hacia fuera, colóquela sobre la nariz y la boca. A continuación, pase las cintas por detrás de las orejas.
2. Presione suavemente el clip nasal para adaptarlo a la nariz.
3. Tire de la parte inferior de la mascarilla para que quede por debajo de la barbilla y compruebe el ajuste.



### Información importante

- Material hipoalergénico, polipropileno y resistente al agua incluyendo la pinza nasal flexible.
- Informe de Ensayos CE emitido por TÜV SÜD.
- Condiciones de conservación: Almacenar en lugar con relativa baja humedad, libre de gases corrosivos, bien ventilado y evitando altas temperaturas (>40°C).



Mascarilla quirúrgica (BFE ≥ 98%)  
Tipo IIR



## Mascarilla quirúrgica (BFE ≥ 98%) Tipo IIR



CARACTERÍSTICAS	ESTÁNDAR	RESULTADOS
Bacterial Filtration Efficiency (BFE)	EN 14683:2019+AC:2019 (E) Anexo B	BFE ≥ 99%
Presión diferencial (ΔP)	EN 14683:2019+AC:2019 (E) Anexo C	ΔP < 38 Pa/cm <sup>2</sup>
Limpieza Microbiana	EN 14683:2019+AC:2019 (E) Anexo D	CFU/g < 20
Penetración de sangre sintética	ISO 22609:2004	No detectada

Fuente: Test Report No.: 200193327 (TÜV SÜD)

### Características bolsa 10 uds

Cantidad: 10 uds/bolsa  
SKU: MASK-ST-00032.0010  
Dimensión: 210 x 120 x 23 mm  
Peso: 25 g

### Características de la caja

Cantidad: 100 bolsas/caja  
Total cantidad: 1000 unidades  
Dimensión: 525 x 435 x 270 mm

