

Mascarilla quirúrgica Tipo IIR (BFE ≥ 98%)



Información técnica

Tipología: Mascarilla quirúrgica. No reutilizable

Modelo: 175 mm x 94 mm

Estándar: EN 14683-2019 + AC:2019. Tipo IIR Eficacia de filtración bacteriana: ≥ 98%

Prestaciones:


Tipo IIR: calidad máxima para quirúrgicas

Resistente a salpicaduras

Estructura: cuerpo de la máscara, pinza nasal

y agarre de la máscara Caducidad: 24 meses

Aviso de alergia: Textil no tejido

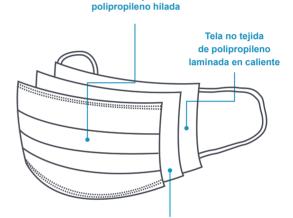

Tela no tejida de

Capa Meltblown de BFE 99%

Instrucciones para ponerse la mascarilla

- 1. Con el lado azul hacia fuera, colóquela sobre la nariz y la boca. A continuación, pase las cintas por detrás de las orejas.
- 2. Presione suavemente el clip nasal para adaptarlo a la nariz.
- 3. Tire de la parte inferior de la mascarilla para que quede por debajo de la barbilla y compruebe el ajuste.







Información importante

- Material hipoalergénico, polipropileno y resistente al agua incluyendo la pinza nasal flexible.
- Informe de Ensayos CE emitido por TÜV SÜD.
- Condiciones de conservación: Almacenar en lugar con relativa baja humedad, libre de gases corrosivos, bien ventilado y evitando altas temperaturas (>40°C).





Mascarilla quirúrgica Tipo IIR (BFE ≥ 98%)









Mascarilla quirúrgica Tipo IIR (BFE ≥ 98%)



CARACTERÍSTICAS	ESTÁNDAR	RESULTADOS
Bacterial Filtration Efficiency (BFE)	EN 14683:2019+AC:2019 (E) Anexo B	BFE ≥ 99%
Presión diferencial (ΔP)	EN 14683:2019+AC:2019 (E) Anexo C	ΔP < 38 Pa/cm2
Limpieza Microbiana	EN 14683:2019+AC:2019 (E) Anexo D	CFU/g < 20
Penetración de sangre sintética	ISO 22609:2004	No detectada

Fuente: Test Report No.: 200193327 (TÜV SÜD)

Características bolsa 10 uds

Cantidad: 10 uds/bolsa

Dimensión: 210 x 120 x 23 mm

Peso: 25 g

Características de la caja

Cantidad: 100 bolsas/caja Total cantidad: 1000 unidades Dimensión: 525 x 435 x 270 mm

SKU: MASK-ST-00032.0010



