



**FARGEOT CIE SAS**  
Route de Limoges - 24800 Thiviers - France

service-client@podowell.com

## **NOTICE : ALBERTA**

Chaussure thérapeutique de série à usage temporaire (CHUT)  
Dispositif Médical Classe I 

### ● **INDICATIONS**

Pathologies temporaires ou réversibles du pied nécessitant une augmentation du volume chaussant de l'avant-pied en raison d'une inflammation, d'un œdème ou d'une lésion.

Se conformer à la prescription et aux recommandations du médecin.

### ● **COMPOSITION**

- Dessus en polyester et polyuréthane
- Doublure en coton
- Semelle en polyuréthane
- Semelle intérieure amovible en mousse de polyuréthane recouverte de microfibre de polyester (référence PODOMED)

### ● **MODE D'ACTION**

Chausson adapté à la morphologie et à la volumétrie du pied :

- Volume chaussant extra-large, très grande ouverture sur le dessus
- Réglage facile par deux bandes auto-agrippantes, permettant des variations de volume autour d'un pied inflammatoire, oedématié ou revêtu de pansements
- Avant extensible pouvant s'adapter à la morphologie et aux déformations de l'avant-pied

### ● **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS**

Ce produit doit être délivré par un personnel de santé habilité.

La pointure doit être adaptée à la morphologie du pied du patient.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin ou votre pharmacien.

### ● **CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN**

Enlever la semelle intérieure pour aérer le chausson quand il n'est pas porté.

Laver la semelle intérieure à la main. Laver le chausson en machine à 30°C maximum, sans essorage ou avec un essorage doux. Si le chausson n'est pas bien rincé, les résidus de lessive peuvent irriter la peau et détériorer le produit. Laisser sécher à l'air libre après avoir remis l'embauchoir pour éviter la déformation du chausson. Ne pas mettre au sèche-linge. Ne pas exposer les chaussons à des sources de chaleur directes comme les poêles, chauffages, radiateurs, exposition directe au soleil etc. Pendant son utilisation ou son nettoyage, ne pas utiliser d'alcool, de pommade ou de liquide dissolvant.

Conserver le produit dans un endroit sec à température ambiante. Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.