



## NOTICE D'UTILISATION

### ALEXIS

Chaussure thérapeutique de série à usage temporaire (CHUT)

#### INDICATIONS

Morphologie ou pathologies du pied nécessitant une augmentation du volume chaussant de l'avant-pied : œdème, inflammation et rhumatismes, métatarsalgie, post-opératoire et retour à la marche.

Se conformer à la prescription ou aux recommandations d'un médecin.

#### COMPOSITION

- Dessus : polyamide sur mousse de polyuréthane
- Doublure éponge : coton et polyester
- Semelle : polyuréthane
- Semelle intérieure amovible en mousse de polyuréthane recouverte de microfibre de polyester (référence PODERGO)

#### MODE D'ACTION

Chausson adapté à la morphologie et à la volumétrie du pied :

- Volume chaussant extra-large, ouverture totale sur le dessus
- Réglage facile par bande auto-agrippante, permettant des variations de volume autour d'un pied inflammatoire, oedématisé ou revêtu de pansements

#### PRECAUTION D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS

La pointure doit être adaptée à la morphologie du pied du patient.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée ou une peau à risque de lésion cutanée. En cas de lésion ou de risque de lésion, le pied doit être protégé avant le port du chausson.

En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

#### CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Bien ajuster le réglage pour éviter les frottements et permettre le maintien du pied sans le comprimer.

Enlever la semelle intérieure pour aérer le chausson quand il n'est pas porté.

Laver la semelle intérieure à la main.

Laver le chausson en machine à 30°C maximum, sans essorage ou avec un essorage doux.


Si le chausson n'est pas bien rincé, les résidus de lessive peuvent irriter la peau et détériorer le produit.

Laisser sécher à l'air libre après avoir remis l'embauchoir pour éviter la déformation du chausson.

Ne pas mettre au sèche-linge.

Ne pas exposer les chaussons à des sources de chaleur directes comme les poêles, chauffages, radiateurs, exposition directe au soleil etc. Pendant leur utilisation ou leur nettoyage, ne pas utiliser d'alcool, de pommade ou de liquide dissolvant.

Transporter et stocker les chaussons dans un endroit sec à température ambiante. Une humidité excessive peut altérer les matériaux qui les composent.

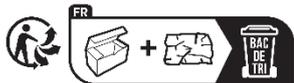

quefairedemesdechets.fr

#### VOTRE AVIS NOUS INTERESSE :

Vous avez acheté une paire de chaussures **ALEXIS**, nous aimerions savoir si vous en êtes satisfait. Vos remarques nous sont utiles pour améliorer nos produits.

Vous pouvez nous en faire part en tapant ce lien dans votre navigateur de recherche :

<https://fr.surveymonkey.com/r/QR-ALEXIS>

ou en scannant directement ce QR Code avec l'appareil photo de votre téléphone portable.



#### Dispositif médical de classe I

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Fabricant :



FARGEOT Cie SAS  
Route de Limoges  
24800 Thiviers- France  
service-client@podowell.com

Version de la notice : V3 Mars 2022