



NOTICE D'UTILISATION

ATLAS

Chaussure thérapeutique de série à usage temporaire (CHUT)

INDICATIONS

Morphologie ou pathologies du pied nécessitant une augmentation du volume chaussant de l'avant-pied : œdème, inflammation et rhumatismes, œdèmes, métatarsalgie, post-opératoire.

Se conformer à la prescription ou aux recommandations d'un médecin.

COMPOSITION

- Dessus : polyester
- Doublure : coton et acrylique
- Semelle : polychlorure de vinyle (PVC)
- Semelle intérieure amovible en mousse caoutchouc de styrène butadiène, recouverte de microfibre de polyester (référence : PODOWASH)

MODE D'ACTION

Chausson adapté à la morphologie et à la volumétrie du pied :

- Volume chaussant extra large, ouverture totale
- Réglage facile par 3 bandes auto-agrippantes sur l'avant pied, permettant des variations de volume autour d'un pied inflammatoire, oedématisé ou revêtu de pansements

PRECAUTION D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS

La pointure doit être adaptée à la morphologie du pied du patient.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée ou une peau à risque de lésion cutanée. En cas de lésion ou de risque de lésion, le pied doit être protégé avant le port du chausson.

En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Bien ajuster le réglage pour éviter les frottements et permettre le maintien du pied sans le comprimer.

Enlever la semelle intérieure pour aérer la chaussure quand elle n'est pas portée.

Laver le chausson et la semelle intérieure en machine à 30°C maximum, sans essorage ou avec un essorage doux.

Si le chausson n'est pas bien rincé, les résidus de lessive peuvent irriter la peau et détériorer le produit.

Laisser sécher à l'air libre après avoir remis l'embauchoir pour éviter la déformation du chausson.

Ne pas mettre au sèche-linge.

Ne pas exposer les chaussons à des sources de chaleur directes comme les poêles, chauffages, radiateurs, exposition directe au soleil etc. Pendant leur utilisation ou leur nettoyage, ne pas utiliser d'alcool, de pommade ou de liquide dissolvant.

Transporter et stocker les chaussons dans un endroit sec à température ambiante. Une humidité excessive peut altérer les matériaux qui les composent.



Carton et papier d'emballage à trier
Chaussures à rapporter dans un point d'apport volontaire
Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr

Dispositif médical de classe I **CE**

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Fabricant :



FARGEOT Cie SAS
Route de Limoges
24800 Thiviers- France
service-client@podowell.com

Version de la notice : Octobre 2021