



**FARGEOT CIE SAS**  
Route de Limoges - 24800 Thiviers - France

service-client@podowell.com

## NOTICE : GEMA

Chaussure thérapeutique de série à usage temporaire (CHUT)  
Dispositif Médical Classe I 

### ● INDICATIONS

Pathologies temporaires ou réversibles du pied nécessitant une augmentation du volume chaussant de l'avant-pied en raison d'une inflammation, d'un œdème ou d'une lésion.

Se conformer à la prescription et aux recommandations du médecin.

### ● COMPOSITION

- Dessus : cuir, polyester
- Doublure : polyester
- Semelle : polyuréthane
- Semelle intérieure amovible en mousse de polyuréthane recouverte de croûte de cuir (référence PODOGAB\_2)

### ● MODE D'ACTION

Chaussure adaptée à la morphologie et à la volumétrie du pied :

- Volume chaussant large, ouverture totale sur le dessus
- Zones latérales extensibles limitant les frottements et l'hyperpression au niveau de l'hallux valgus
- Réglage facile par trois bandes auto-agrippantes dont deux extra-longues permettant des variations de volume autour d'un pied inflammatoire, oedématié ou revêtu de pansements

### ● PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS

Ce produit doit être délivré par un personnel de santé habilité.

La pointure doit être adaptée à la morphologie du pied du patient.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin ou votre pharmacien.

### ● CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Les deux brides croisées sont extra longues et peuvent être découpées pour être raccourcies en fonction du volume du pied. Bien découper avec des ciseaux entre les coutures. Enlever la semelle intérieure pour aérer la chaussure quand elle n'est pas portée. Laver la semelle intérieure à la main. Nettoyer la chaussure à l'aide d'une éponge humide, laisser sécher puis appliquer sur le cuir une crème nourrissante avec un chiffon doux. Ne pas exposer la chaussure à des sources de chaleur directes comme les poêles, chauffages, radiateurs, exposition directe au soleil etc. Pendant son utilisation ou son nettoyage, ne pas utiliser d'alcool, de pommade ou de liquide dissolvant. Conserver la chaussure dans un endroit sec à température ambiante.



Carton et papier d'emballage à trier  
Chaussures à rapporter dans un point d'apport volontaire  
Pour en savoir plus : [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

### GARANTIE

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ce produit, le cuir utilisé peut présenter de légères différences d'aspect qui ne doivent pas être considérées comme des défauts.

Version de la notice : Janvier 2021