



**FARGEOT CIE SAS**  
Route de Limoges - 24800 Thiviers - France

service-client@podowell.com

## NOTICE : OSCAR

Chaussure thérapeutique de série à usage temporaire (CHUT)  
Dispositif Médical Classe I 

### ● INDICATIONS

Pathologies temporaires ou réversibles du pied nécessitant une augmentation du volume chaussant de l'avant-pied en raison d'une inflammation, d'un œdème ou d'une lésion.

Se conformer à la prescription et aux recommandations du médecin.

### ● COMPOSITION

- Dessus : cuir
- Doublure : polyester
- Semelle : polyuréthane
- Semelle intérieure amovible en mousse de polyuréthane recouverte de microfibre de polyester (référence PODOMED)
- Intercalaire : éthylène-acétate de vinyle

### ● MODE D'ACTION

Chaussure adaptée à la morphologie et à la volumétrie du pied :

- Volume chaussant extra-large, grande ouverture (volume variable grâce à l'intercalaire amovible)
- Réglage facile par deux bandes auto-agrippantes extra longues permettant des variations de volume autour d'un pied inflammatoire, oedématisé ou revêtu de pansements

### ● PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS

Ce produit doit être délivré par un personnel de santé habilité.

La peinture doit être adaptée à la morphologie du pied du patient.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin ou votre pharmacien.

### ● CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

L'intercalaire situé sous la semelle amovible peut être retiré pour augmenter le volume chaussant, dans ce cas la semelle amovible doit être bien positionnée avant d'utiliser la chaussure. Enlever la semelle intérieure pour aérer la chaussure quand elle n'est pas portée. Laver la semelle intérieure à la main. Nettoyer l'intercalaire à l'aide d'une éponge humide puis l'essuyer avec un chiffon propre. Nettoyer la chaussure à l'aide d'une éponge humide, laisser sécher puis appliquer sur le cuir une crème nourrissante avec un chiffon doux. Ne pas exposer les chaussures à des sources de chaleur directes comme les poêles, chauffages, radiateurs, exposition directe au soleil etc. Pendant son utilisation ou son nettoyage, ne pas utiliser d'alcool, de pommade ou de liquide dissolvant. Conserver la chaussure dans un endroit sec à température ambiante.



Carton et papier d'emballage à trier  
Chaussures à rapporter dans un point d'apport volontaire  
Pour en savoir plus : [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

### GARANTIE

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ce produit, le cuir utilisé peut présenter de légères différences d'aspect qui ne doivent pas être considérées comme des défauts.

Version de la notice : Janvier 2021