



FARGEOT CIE SAS

Route de Limoges - 24800 Thiviers - France

service-client@podowell.com

NOTICE : PADRIG

Chaussure thérapeutique de série à usage temporaire (CHUT)
Dispositif Médical Classe I 

● **INDICATIONS**

Pathologies temporaires ou réversibles du pied nécessitant une augmentation du volume chaussant de l'avant-pied en raison d'une inflammation, d'un œdème ou d'une lésion.

Se conformer à la prescription et aux recommandations du médecin.

● **COMPOSITION**

- Dessus en cuir de bovin et textile (polyuréthane, polyamide et élasthanne)
- Doublure en polyester ON STEAM® et polyamide
- Semelle en polyuréthane
- Semelle intérieure amovible en mousse de polyuréthane recouverte de microfibre de polyester

● **MODE D'ACTION**

Chaussure adaptée à la morphologie et à la volumétrie du pied :

- Volume chaussant extra-large, grande ouverture
- Réglage facile, permettant des variations de volume autour d'un pied inflammatoire ou oedématié
- Zone extensible sur le dessus du pied limitant les frottements et l'hyperpression

● **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS**

En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Ce produit doit être délivré par un personnel de santé habilité.

La pointure doit être adaptée à la morphologie du pied du patient.

● **CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN**

Enlever la semelle intérieure pour aérer la chaussure quand elle n'est pas portée.

Ne pas exposer les chaussures à des sources de chaleur.

Nettoyer à l'aide d'une éponge humide, laisser sécher puis appliquer sur le cuir une crème nourrissante avec un chiffon doux.

● **GARANTIE**

Le cuir est un produit vivant, il est impossible de garantir un aspect homogène malgré tout le soin apporté à la fabrication de ce produit.