



## NOTICE D'UTILISATION

### PATXI

Chaussure thérapeutique de série à usage temporaire (CHUT)

#### INDICATIONS

Morphologie ou pathologies du pied nécessitant une augmentation du volume chaussant de l'avant-pied : œdème, inflammation et rhumatismes, orteils en griffe ou en marteau, névrome de Morton.  
Se conformer à la prescription ou aux recommandations d'un médecin.

#### COMPOSITION

Dessus : polyamide, polyuréthane et élasthanne

Doublure : polyamide

Première de propreté : mousse de polyuréthane recouverte de microfibre de polyester (référence : PODOMED)

Semelle : polyuréthane

#### MODE D'ACTION

Chaussure adaptée à la morphologie et à la volumétrie du pied :

- Volume chaussant extra-large,
- Réglage facile, permettant des variations de volume autour d'un pied inflammatoire ou œdématié,
- Zone extensible sur l'avant du pied permettant de s'adapter à la morphologie et aux déformations des orteils.

#### PRECAUTION D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS

La pointure doit être adaptée à la morphologie du pied du patient.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée ou une peau à risque de lésion cutanée. En cas de lésion ou de risque de lésion, le pied doit être protégé avant le port de la chaussure.

En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

#### CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Enlever la semelle intérieure pour aérer la chaussure quand elle n'est pas portée.

Laver la semelle intérieure à la main.

Nettoyer la chaussure à l'aide d'une éponge humide puis laisser sécher.

Ne pas exposer les chaussures à des sources de chaleur directes comme les poêles, chauffages, radiateurs, exposition directe au soleil etc. Pendant leur utilisation ou leur nettoyage, ne pas utiliser d'alcool, de pommade ou de liquide dissolvant.

Transporter et stocker les chaussures dans un endroit sec à température ambiante. Une humidité excessive peut altérer les matériaux qui les composent.



Carton et papier d'emballage à trier  
Chaussures à rapporter dans un point d'apport volontaire  
Pour en savoir plus : [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

Dispositif médical de classe 1 **CE**

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Fabricant :



FARGEOT Cie SAS

Route de Limoges

24800 Thiviers- France

[service-client@podowell.com](mailto:service-client@podowell.com)

Version de la notice : Mai 2021