



**FARGEOT CIE SAS**  
Route de Limoges - 24800 Thiviers - France

[service-client@podowell.com](mailto:service-client@podowell.com)

## **NOTICE : PSYLVIA**

Chaussure thérapeutique de série à usage temporaire (CHUT)  
Dispositif Médical Classe I 

### ● INDICATIONS

Pathologies temporaires ou réversibles du pied nécessitant une augmentation du volume chaussant de l'avant-pied en raison d'une inflammation, d'un œdème ou d'une lésion.

Se conformer à la prescription et aux recommandations du médecin.

### ● COMPOSITION

- Dessus : polyamide, polyester, élasthanne, polyuréthane
- Doublure : coton, polyamide, polyuréthane
- Semelle : polyuréthane
- Semelle intérieure amovible en mousse de polyuréthane recouverte de microfibre de polyester (référence PODOFIRST)

### ● MODE D'ACTION

Chaussure adaptée à la morphologie et à la volumétrie du pied :

- Volume chaussant normal, grande ouverture
- Réglage facile par une bande auto-agrippante permettant des variations de volume autour d'un pied inflammatoire ou oedématisé
- Zone extensible sur l'avant du pied permettant de s'adapter à la morphologie et aux déformations des orteils

### ● PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS

Ce produit doit être délivré par un personnel de santé habilité.

La pointure doit être adaptée à la morphologie du pied du patient.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin ou votre pharmacien.

### ● CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Enlever la semelle intérieure pour aérer la chaussure quand elle n'est pas portée.

Laver la semelle intérieure à la main. Nettoyer la chaussure à l'aide d'une éponge humide puis laisser sécher. Ne pas exposer la chaussure à des sources de chaleur directes comme les poêles, chauffages, radiateurs, exposition directe au soleil etc. Pendant son utilisation ou son nettoyage, ne pas utiliser d'alcool, de pommade ou de liquide dissolvant. Conserver la chaussure dans un endroit sec à température ambiante.



Carton et papier d'emballage à trier  
Chaussures à rapporter dans un point d'apport volontaire  
Pour en savoir plus : [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)