



FARGEOT CIE SAS
Route de Limoges - 24800 Thiviers - France

service-client@podowell.com

NOTICE : SIMONA Smart

Chaussure thérapeutique de série à usage temporaire (CHUT)
Dispositif Médical Classe I 

● **INDICATIONS**

Pathologies temporaires ou réversibles du pied nécessitant une augmentation du volume chaussant de l'avant-pied en raison d'une inflammation, d'un œdème ou d'une lésion.

Se conformer à la prescription et aux recommandations du médecin.

● **COMPOSITION**

- Dessus en polyamide, cuir de bovin, élasthanne
- Doublure en microfibre de polyester, polyamide et élasthanne
- Semelle en polyuréthane
- Semelle intérieure amovible en mousse de polyuréthane recouverte de microfibre de polyester (référence PODOLINE)

● **MODE D'ACTION**

Chaussure adaptée à la morphologie et à la volumétrie du pied :

- Volume chaussant large, grande ouverture
- Réglage facile par une bande auto-agrippante, permettant des variations de volume autour d'un pied inflammatoire, ou oedématié
- Avant extensible permettant de s'adapter à la morphologie et aux déformations de l'avant-pied et limitant les frottements et l'hyperpression

● **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS**

Ce produit doit être délivré par un personnel de santé habilité.

La pointure doit être adaptée à la morphologie du pied du patient.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin ou votre pharmacien.

● **CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN**

Enlever la semelle intérieure pour aérer la chaussure quand elle n'est pas portée.

Laver la semelle intérieure à la main. Nettoyer à l'aide d'une éponge humide, puis laisser sécher. Ne pas exposer les chaussures à des sources de chaleur directes comme les poêles, chauffages, radiateurs, exposition directe au soleil etc. Pendant son utilisation ou son nettoyage, ne pas utiliser d'alcool, de pommade ou de liquide dissolvant.

Conserver le produit dans un endroit sec à température ambiante. Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

● **GARANTIE**

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ce produit, le cuir utilisé peut présenter de légères différences d'aspect qui ne doivent pas être considérées comme des défauts.