



FARGEOT CIE SAS
Route de Limoges - 24800 Thiviers - France

service-client@podowell.com

NOTICE : VICKIE

Chaussure thérapeutique de série à usage temporaire (CHUT)
Dispositif Médical Classe I 

● **INDICATIONS**

Pathologies temporaires ou réversibles du pied nécessitant une augmentation du volume chaussant de l'avant-pied en raison d'une inflammation, d'un œdème ou d'une lésion.

Se conformer à la prescription et aux recommandations du médecin.

● **COMPOSITION**

- Dessus : cuir, polyuréthane, polyamide, élasthanne
- Doublure : polyester
- Semelle en polyuréthane
- Semelle intérieure amovible en mousse de polyuréthane recouverte de microfibre de polyester (référence PODOMED)

● **MODE D'ACTION**

Chaussure adaptée à la morphologie et à la volumétrie du pied :

- Volume chaussant extra-large
- Enfilage facile grâce au cou de pied dégagé et à la languette rembourrée et élastiquée, permettant des variations de volume autour d'un pied inflammatoire ou oedématié.

● **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS**

Ce produit doit être délivré par un personnel de santé habilité.

La pointure doit être adaptée à la morphologie du pied du patient.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin ou votre pharmacien.

● **CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN**

Enlever la semelle intérieure pour aérer la chaussure quand elle n'est pas portée.

Laver la semelle intérieure à la main. Nettoyer à l'aide d'une brosse souple.

Ne pas exposer les chaussures à des sources de chaleur directes comme les poêles, chauffages, radiateurs, exposition directe au soleil etc.

Pendant son utilisation ou son nettoyage, ne pas utiliser d'alcool, de pommade ou de liquide dissolvant. Conserver le produit dans un endroit sec à température ambiante.

Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.