



## NOTICE D'UTILISATION

### SUZIE\_02

Chaussure thérapeutique de série à usage temporaire (CHUT)

#### INDICATIONS

Morphologie ou pathologies du pied nécessitant une augmentation du volume chaussant de l'avant-pied : inflammation et rhumatismes, œdème, hallux-valgus, quintus varus, orteils en griffe ou en marteau.

Se conformer à la prescription ou aux recommandations d'un médecin.

#### COMPOSITION

- Dessus : cuir, polyester
- Doublure : polyester
- Première de propreté : mousse de polyuréthane recouverte de microfibre de polyester (référence PODOLINE)
- Intercalaire : éthylène-acétate de vinyle EVA
- Semelle : polyuréthane

#### MODE D'ACTION

Chaussure adaptée à la morphologie et à la volumétrie du pied :

- Volume chaussant large à extra-large (en retirant l'intercalaire),
- Réglage facile et très bon maintien grâce aux deux brides auto-agrippantes, permettant des variations de volume autour d'un pied inflammatoire ou oedématisé
- Matériau extensible sur l'avant pied permettant de s'adapter aux déformations des orteils

#### PRECAUTION D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS

La pointure doit être adaptée à la morphologie du pied du patient.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée ou une peau à risque de lésion cutanée. En cas de lésion ou de risque de lésion, le pied doit être protégé avant le port de la chaussure.

En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

#### CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN


L'intercalaire situé sous la semelle amovible peut-être retiré pour augmenter le volume chaussant, dans ce cas la semelle amovible doit être bien positionnée avant d'utiliser la chaussure. Bien ajuster le réglage pour éviter les frottements et permettre le maintien du pied sans le comprimer. Vérifier que la languette est bien positionnée.

Enlever la semelle intérieure pour aérer la chaussure quand elle n'est pas portée. Laver la semelle intérieure à la main.

Nettoyer la chaussure à l'aide d'une éponge humide, puis laisser sécher. Ne pas exposer les chaussures à des sources de chaleur directes comme les poêles, chauffages, radiateurs, exposition directe au soleil etc. Pendant leur utilisation ou leur nettoyage, ne pas utiliser d'alcool, de pommade ou de liquide dissolvant.

Transporter et stocker les chaussures dans un endroit sec à température ambiante. Une humidité excessive peut altérer les matériaux qui les composent.

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ce produit, le cuir utilisé peut présenter de légères différences d'aspect qui ne doivent pas être considérées comme des défauts.

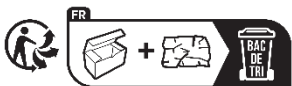

quefairedemesdechets.fr

#### VOTRE AVIS NOUS INTERESSE :

Vous avez acheté une paire de chaussures **SUZIE\_02**, nous aimerions savoir si vous en êtes satisfait. Vos remarques nous sont utiles pour améliorer nos produits.

Vous pouvez nous en faire part en tapant ce lien dans votre navigateur de recherche :

<https://fr.surveymonkey.com/r/SUZIE02>

ou en scannant directement ce QR Code avec l'appareil photo de votre téléphone portable.



#### Dispositif médical de classe I

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Fabricant :



Route de Limoges  
24800 Thiviers- France  
service-client@podowell.com

Version de la notice : VI Septembre 2023