



## Le scooter fauteuil FD PENDEL

Avez-vous un fauteuil roulant manuel? Alors, vous savez combien il est épuisant de se déplacer sur de très longues distances. Le FD **Pendel** (traction avant) Scooter fauteuil roulant vous permet de voyager sur de très longues distances facilement et sans problème tout en restant assis dans votre propre fauteuil roulant. Vous êtes autonome, vous n'aurez pas besoin d'aide pour entrer ou sortir du scooter. Fondamentalement, le FD Pendel est le moyen de transport idéal si vous avez des difficultés pour effectuer un transfert de votre fauteuil et que vous voulez être autonome sur ces longues distances.

### Mise en place facile et rapide.

Vous utilisez la fonction d'abaissement et, le FD Pendel va descendre au sol face à vous. Entrez dans le Pendel, la fonction 'remontée' va caler votre fauteuil dans le Pendel. Maintenant vous êtes prêt à partir sur la route. Une fois que vous avez atteint votre destination, activez à nouveau la fonction d'abaissement. Votre fauteuil est automatiquement libéré. Tout ce que vous avez à faire est d'enlever la clé de l'interrupteur. Cela provoque le verrouillage du FD Pendel. Vous êtes prêt à aller faire du shopping, de profiter du soleil, ou rendre visite à des amis. Vous restez toujours fidèle à votre fauteuil roulant personnel.

### Un produit de très haute qualité

Le FD Pendel utilise deux batteries qui vous permettent une autonomie d'environ 60 Km.. L'indicateur de niveau de charge des batteries, situé sur le tableau de bord va vous indiquer le niveau de charge de celles-ci

. Le chargeur de batterie livré avec le FD Pendel vous permet de recharger rapidement les batteries . Une nuit de recharge et elles seront complètement rechargées. La vitesse est également assez impressionnante: le FD Pendel a une vitesse maximale de 25 km / h, qui vous permet de vous rendre d'un point à un autre rapidement. Le FD Pendel peut gravir des pentes allant jusqu'à 17%, sans grande difficulté. La traction avant le rend très maniable. Votre sécurité personnelle sera assurée par l'éclairage avant et arrière, un avertisseur et les indicateurs de direction. Le FD Pendel dispose d'un dispositif de sécurité de surcharge. Vous pouvez programmer vos paramètres personnels sur le tableau de bord. Une trousse d'accessoires complète l'équipement du FD Pendel. Divers ajustements sont possibles pour répondre à vos besoins.

## Dimensions, charge admissible et l couleur

Le modèle standard du FD Pendel est de 100 cm en largeur. La largeur maximale autorisée de votre fauteuil roulant est de 72 cm. La charge maximale pour le FD Pendel est de 160 kg. Cela signifie que vous pouvez utiliser le FD Pendel avec un fauteuil roulant classique ou un fauteuil roulant électrique tant que le poids du fauteuil roulant et vous même ne dépasse pas 160 kg. Outre le modèle standard, vous pouvez aussi choisir le modèle plus large. Ce modèle est de 108 cm de largeur et permet d'intégrer des fauteuils roulants d'une largeur allant jusqu'à 80 cm. La couleur standard du FD Pendel est «bleu nuit ». D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

**Longueur 176 cm**

**Largeur 100 cm (108)\***

**Hauteur 106 cm**

**Profondeur utilisable 66 cm (72) \***

**Longueur hors tout 120 cm**

**Garde au sol 15 cm**

**Poids avec batteries . 140 kg**

**Charge maximum 160 kg**

**Vitesse maximum 25 km/h**

**Autonomie : environ 60 km suivant utilisation et configuration terrain**

**Pente maximum 20%**

**Rayon de giration 4,2 m**

**Encombrement 120 x 200 cm**

